

Atemschutzmaske Gebrauchsanweisung

FFP2 Atemschutzmaske zum Schutz vor festen und flüssigen gesundheitsschädlichen Stäuben , Rauch und Aerosolen sowie Schutz vor luftübertragbaren Infektionen.



Anwendung

1. Maske öffnen und den Nasenclip weiten
2. Maske mit den Haltebändern nach unten in die Hände legen
3. Die Maske zuerst über das Kinn, dann über die Nase ziehen
4. Die Haltebänder hinter den Ohren platzieren
5. Nasenclip individuell an die Nase anpassen, auf Dichtheit achten

Warnungen

1. Nicht verwenden wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist
2. Das Produkt sollte nach dem Öffnen des Beutels schnell gebraucht werden.
3. Der Beutel sollte nach dem Öffnen und einer Einzelentnahme schnellstmöglich wieder verschlossen werden
4. Nicht mit anderen Masken zusammen tragen. Nur Einzelverwendung.
5. Empfohlene Tragedauer 4 Std.
6. Bei Unwohlsein die Maske sofort absetzen. Auch bei Übelkeit, Schwindel, Atemnot
7. Entsorgen Sie die Maske nach dem Gebrauch und wenn der Durchlass nachlässt
8. Nicht mit anderen Masken zusammen tragen. Single User.
9. Trocken und Dunkel lagern. Kontakt mit scharfen Gegenständen vermeiden.